

企業・団体向け販売用 コロナウイルス抗原検査キット

(ウェルサイン™-COVID19 Ag)


研究用試薬

医師の企画で検証し実現したキット

15 MINUTES
DETECTION TIME

簡単 安心 実効

迅速 安価

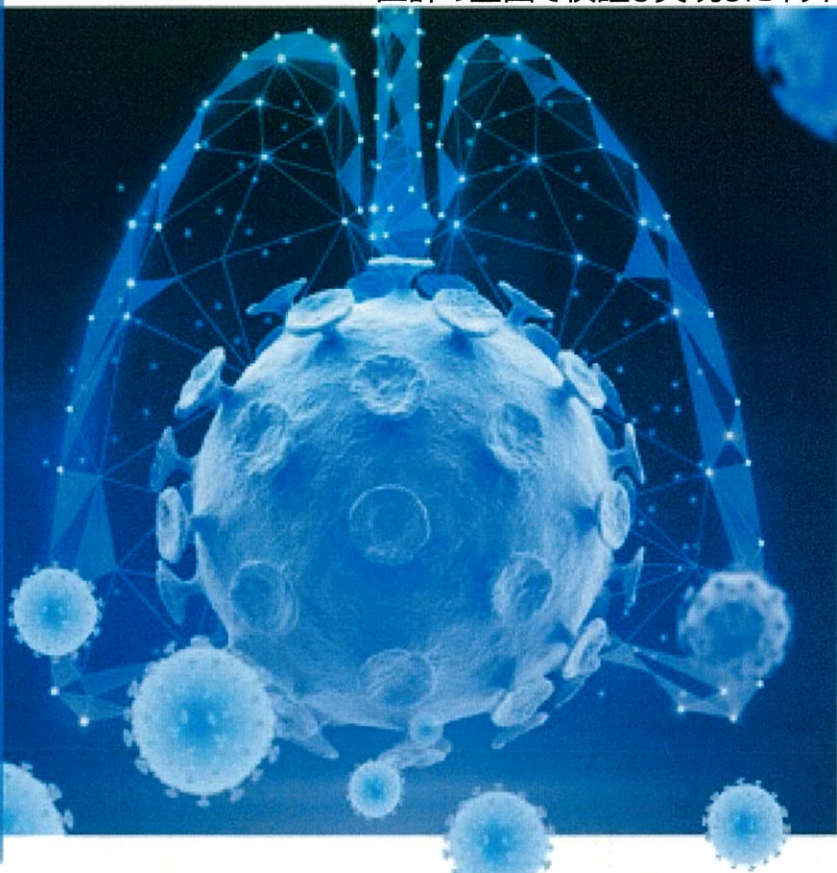

いつでも、どこでも、誰でも、安心な検査

本キットの特徴

本検査キットはCOVID19Ag抗原を綿棒で収集し、ヌcleoカプシド蛋白質抗原を定性的に検出します。

- ① のどの奥や鼻の入り口を拭うだけの簡単操作
- ② 15分以内の迅速な結果判定
- ③ 複数回使用目的で、低価格を実現
- ④ ウイルス抗原の試験研究に使用できます

定価：750円/1キット（税込）

1梱包（40箱、1,000キット）単位での販売
（寸法：61 x 46 x 37 cm、約14 kg）



25キット/箱（19.5x15.5x6.5 cm）約 0.3 kg



保管：2-30℃
（2年間安定）

販売元 ウェルサイン株式会社 (Welsign Co., Ltd.)
〒157-0094 板橋区成増3-40-3-802
Mail: service@welsign.co.jp HP: <https://welsign.co.jp/>

研究用

本製品は体外診断用医薬品ではございません。
診断・治療目的には使用できません。

販売は企業・団体のみで、個人向けには販売しておりません。

鼻腔または咽頭スワブ採取用 ウェルサイン抗原検査キット 検査説明書

製品名：ウェルサイン™-COVID19 Ag
(研究用)

販売元：ウェルサイン株式会社 (Welsign Co., Ltd.)
〒157-0094 板橋区成増3-40-3-802
Mail: service@welsign.co.jp
HP: https://welsign.co.jp/

1. 準備

手を洗い、必要であればアルコール等で消毒します。

※咽頭から採取する前の1時間は、飲食やうがいを避けてください

2. 開封

箱またはビニール袋の中から検査試薬 (①)、検体用チューブ (②)、キャップ (③)、綿棒 (④)、検査キット (⑤) を取り出し並べます。

※開封してから1時間以内に検査を終了させてください。

3. 採取

鼻腔スワブ または 咽頭スワブ



① 溶液を移す

②

検査試薬①の中の溶液を
検体用チューブ②に全量移
します。

④

10回
2cm挿入
5回転、5秒

鼻腔の入り口
2cmに綿棒④を入れ、5回転、
5秒置きます。取り出した綿棒
を溶液の中に挿入し、10回ほ
ど回しながら指で絞ります。

④

10回
5ヶ所で5秒

咽頭の奥5カ所を、1カ所1秒程度、
綿棒④で軽く拭きます。綿棒を溶液
の中に挿入し、10回ほど回しながら
指で絞ります。

OR



例：陰性の場合

15分後
結果確認

⑤

3滴


チューブを逆さにして、検査用キット⑤の「S」の穴に3滴加えます。
約15分後に検査結果を確認できます。
※検査結果は滴下後20分以内に確認ください。

③

キャップ③を
取り付けます。

指でチューブを
強くつまみ、綿
棒を絞りながら
引き抜きます。

4. 判定

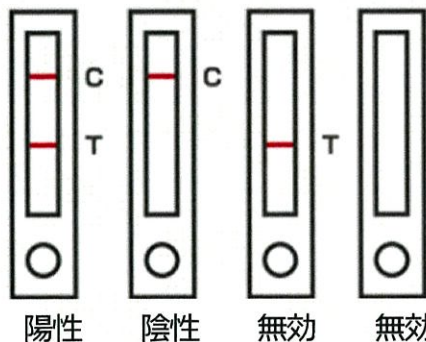

C: コントロールライン

T: テストライン (結果判定用)

【保管方法・使用期間の目安】
1～30℃の冷暗所保管で2年間安定
※夏期などは、高温多湿は避けてください。
※長期間保存の場合には冷蔵を推奨します。

5. 終了後

密封できるビニール袋に入れて廃棄してください。

研究用 本製品は体外診断用医薬品ではありません。
診断・治療目的には使用できません。